

Como colocar e remover protecção ocular

Colocar protecção ocular



- Coloque na face, de forma a cobrir integralmente os olhos
- Ajuste a protecção

Remover protecção ocular



- Com mãos limpas, remova a protecção ocular pegando-a por traz



- Coloque a protecção no lixo



- Lave as mãos

Alguns óculos de protecção podem ser limpos e desinfectados para reutilização, nestes casos não os coloque no lixo, mas no recipiente para desinfeção.

Indicado para atendimento ao público e área médica.



ecosaúde
porque a vida não pára

www.ecosaude.pt